

barfuß.

Das
Magazin
von RUCK

Ausgabe 01 | 2024



RUCK®

Pflegeprodukte

**Studie belegt die
Wirksamkeit der
peclavus PODOcare
Fußcreme fettend**

Einrichtung

*Neue Polster-
materialien und
-farben für jeden
Geschmack*

Instrumente

**Vom Rohling zum
präzisen Instrument -
so werden RUCK
Instrumente gefertigt**

Unternehmen

*Füße bewegen
uns - seit
97 Jahren!*

Liebe Kundinnen und Kunden,

endlich ist es soweit: Die erste Ausgabe von barfuß ist erschienen. Dreimal im Jahr stellen wir in diesem neuen Format inspirierende redaktionelle Inhalte zusammen, die für Ihren beruflichen Alltag von Interesse sind. Neben Neuigkeiten aus unserem Unternehmen und aktuellen Informationen aus der Branche dürfen praxisbezogene Fachartikel nicht fehlen.

Lesen Sie in dieser Ausgabe, warum Sie sich auf die Wirksamkeit und Verträglichkeit der peclavus PODOcare Fußcreme fettend verlassen können, lernen Sie die neue Polstergeneration der RUCK Behandlungsliegen und Arbeitsstühle kennen und erhalten Sie exklusive Einblicke in die Herstellung der RUCK Instrumente. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Entdecken.

Herzliche Grüße aus Neuenbürg!
Simeon und Samuel Ruck



Simeon Ruck Geschäftsführer der HELLMUT RUCK GmbH
Samuel Ruck Bereichsleitung Bildung und Vertrieb

**Wie gefällt Ihnen barfuß?
Wir freuen uns über Ihr Feedback
an barfuss@hellmut-ruck.de**

Hellmut Ruck erhält Preis für sein Lebenswerk



Foto: ©HeyMo | Moritz Schleiffelder

Ein emotionaler Moment für die RUCK-Familie: Bei der Verleihung des BEAUTY FORUM Stars Awards 2023 wurde Hellmut Ruck, der langjährige Geschäftsführer der HELLMUT RUCK GmbH, mit dem Prix d'honneur de la beauté für sein Lebenswerk geehrt.

Hellmut Ruck hat sein Leben der Fußgesundheit verschrieben und den vom Vater übernommenen Fachgroßhandel zum Branchenführer im Bereich Fußpflege und Podologie aufgebaut. In einer Videopräsentation kamen Weggefährter:innen, Geschäftspartner:innen, Mitarbeitende und die Familie zu Wort, teilten ihre Erlebnisse und gratulierten zu der verdienten Auszeichnung. „Besonders dankbar bin ich für meine Familie und meine sechs Kinder. Der Generationenwechsel ist gelungen, mein Blick in die Zukunft voller Zuversicht und von meinem Glauben an Gott getragen“, betont Hellmut Ruck.

„ICH BIN SEHR GLÜCKLICH ÜBER DIESE AUSZEICHNUNG. SIE FASST FÜR MICH ALLES DAS ZUSAMMEN, WAS WIR BIS HEUTE ALS FAMILIENUNTERNEHMEN ERREICHT HABEN.“

Hellmut Ruck

„Es war mir immer ein wichtiges Anliegen, die Herzen der Menschen zu erreichen – ich hoffe, dass mir das gelungen ist.“ Zum Abschluss überreichte Simeon Ruck ein von den Mitarbeitenden gestaltetes Erinnerungsbuch, in dem jede:r eine persönliche Widmung und einen Fußabdruck für den langjährigen Firmenchef hinterlassen hatte.

Hellmut Ruck
Einen Überblick über sein Lebenswerk und die Geschichte des Unternehmens gibt es im Video!



Die jungen Zukunftsgestalter

Mit frischen Ideen und bewährten Werten nimmt die HELLMUT RUCK GmbH Kurs auf die Zukunft. Die dritte Generation kombiniert Tradition mit einem zukunftsorientierten agilen Ansatz, um das Erbe von Hellmut Ruck erfolgreich weiterzuführen.

Mit Innovationskraft und Stärke

Traditionelle Werte erhalten und Neues gestalten ist ein Leitgedanke von Simeon Ruck. Nach Abschluss seines betriebswirtschaftlichen Studiums übernahm er wichtige Funktionen im Unternehmen, war federführend an innovativen Produktentwicklungen beteiligt, revolutionierte das Personalwesen und baute die Marketingabteilung auf. 2017 trat er mit in die Geschäftsführung ein, die er seit Juni 2019 allein innehat. „Wir haben als Unternehmen eine klare Zukunftsvision“, erklärt Simeon Ruck: „Alle Menschen lieben natürlich schöne und gesunde Füße. Tagtäglich setzen wir uns mit Liebe und Leidenschaft dafür ein, dass diese Vision Wirklichkeit wird.“

Ganz nah an den Kund:innen

Anfang 2023 ist ein weiteres Familienmitglied in die Unternehmensführung aufgerückt: Samuel Ruck, der jüngste Sohn von Hellmut Ruck, hat die Bereichsleitung für Bildung und Vertrieb übernommen. Neben seinem Studium bringt Samuel Ruck als ausgebildeter Podologe nicht nur fachliche Qualifikation, sondern auch ein erhebliches Potential an Praxiserfahrung mit ein – für die Weiterentwicklung des Bildungsangebots von unschätzbarem Wert.

Zukunftsfähig durch gute Führungskultur

Um den immer neuen und komplexen Herausforderungen der heutigen Zeit gerecht zu werden, setzen Geschäftsführer Simeon Ruck und sein Bruder Samuel auf eine intrinsisch motivierte Führungskultur. Dabei bildet die Geschäftsführungsebene gemeinsam mit den motivierten Führungskräften ein Team auf Augenhöhe. Die flache Hierarchie soll kurze Entscheidungswege, Flexibilität und Innovation fördern.

„Der Teamgedanke hat für mich eine Leitfunktion in der Personalführung“, erklärt Geschäftsführer Simeon Ruck. Mit einer klaren Vision für die Zukunft und einem starken Team, das hinter dieser Vision steht, ist die HELLMUT RUCK GmbH gut gerüstet, um alle kommenden Herausforderungen zu meistern, sich weiter zu entwickeln und weiter zu wachsen.

Mit Simeon und Samuel Ruck kann das Unternehmen auf eine starke Doppelspitze bauen, die das über Generationen hinweg gesammelte Wissen und die Tradition bewahren und alles dafür tun wird, um RUCK erfolgreich in die Zukunft zu führen.

Der 1. Nagelkorrekturkongress neu

Ein Tag in der RUCK Akademie

Die RUCK Akademie setzt sich seit ihrer Gründung für Innovation und hohe Bildungsqualität in den Bereichen Podologie und Fußpflege ein, denn bei RUCK soll Bildung echten Mehrwert schaffen. Durch zahlreiche Präsenz- und Hybridveranstaltungen sowie digitale Webinare wird die RUCK Akademie zum Dreh- und Angelpunkt Ihrer professionellen Fort- und Weiterbildung.



Ein neues Highlight in diesem Jahr: der 1. Nagelkorrekturkongress. Lassen Sie sich schon jetzt von einem exklusiven Einblick in den Auftakttag begeistern.

Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz!



INFO

Die RUCK Akademie Veranstaltungen 2024:

- 13. JULI 2024** RUCK Hausmesse
- 26.-27. SEPTEMBER 2024** Nagelkorrekturkongress (12 FBP)
- 10.-11. OKTOBER 2024** Wundkongress (12 FBP)
- 15.-16. NOVEMBER 2024** Diabetes Forum (12 FBP)



Kennen Sie schon unsere RUCK-Messetermine 2024? Weitere Informationen finden Sie unter hellmut-ruck.de.

9:00 Uhr: Begrüßung

Der erste Tag des Nagelkorrekturkongresses beginnt mit einer herzlichen Begrüßung in den Räumlichkeiten der RUCK Akademie in Neuenbürg.

9:30 Uhr: Grundlagen der Nagelpathologie

Der erste Vortrag über die Grundlagen der Nagelpathologie gibt eine fundierte Einführung und bildet das Fundament für das tiefere Verständnis der nachfolgenden Themen. Der Dozent steht sowohl während des Vortrags als auch danach für alle Fragen zur Verfügung.

11:00 Uhr: Techniken der Nagelkorrektur

Besonders aufschlussreich ist die Vorstellung verschiedener Nagelkorrekturtechniken. Der Austausch über die Vor- und Nachteile einzelner Methoden bietet wertvolle Einblicke für die tägliche Praxis.

12:00 Uhr: Mittagspause

Über den Dächern von Neuenbürg und mit Blick ins Grüne schmeckt das Mittagessen gleich doppelt so gut. Die Pause bildet den perfekten Rahmen, um sich mit den anderen Teilnehmer:innen auszutauschen.

13:00 Uhr: Podologie – Praxisbeispiele

Nach der Mittagspause stehen verschiedene Praxisbeispiele im Fokus. Die realitätsnahen Darstellungen von Nagelkorrekturspangen im Podologiealltag vermitteln den korrekten Umgang mit Nagelkorrekturspangen, um den optimalen Behandlungserfolg zu erzielen.

Ab 17:00 Uhr: Networking-Abend

Der Tag endet genussvoll mit eigens kreierten Cocktails und einem gesunden Abendessen in der GENUSS KULTUR Black Forest. In lockerer Atmosphäre eröffnen sich Möglichkeiten für anregende Gespräche und das Knüpfen neuer Kontakte.

Am zweiten Tag folgen spannende Themen wie die korrekte Abrechnung von Nagelkorrekturbehandlungen und die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Es lohnt sich, den 26. und 27. September 2024 im Kalender vorzumerken und sich schon jetzt einen der begehrten Plätze zu sichern.



dermatest Studie belegt

Wirksamkeit der peclavus[®] PODOcare Fußcreme fettend

Studie bestätigt Verbesserung der Hautfeuchtigkeit um mehr als **190%**

95% bewerten die feuchtigkeitsspendende Wirkung als gut bis sehr gut

90% bewerten das Hautgefühl direkt nach Anwendung als weich bis sehr weich



Die peclavus Fußcreme fettend erhält die höchstmögliche Auszeichnung und damit ein 5-Sterne Siegel für Hautverträglichkeit:

Die peclavus PODOcare Fußcreme fettend wirkt nachweislich gegen sehr trockene Füße. Zu diesem Ergebnis ist die Dermatest GmbH nach Durchführung einer klinisch-dermatologischen Anwendungsstudie gekommen. Ziel der Studie ist es, auf fundierte und transparente Weise darzulegen, dass die Fußcreme fettend rissige und sehr trockene Füße wieder weich macht und die Elastizität verbessert. Dazu wurden strenge

Auswahlkriterien für die Studienteilnehmer:innen festgelegt, um die Integrität und Aussagekraft der Ergebnisse zu gewährleisten. Im Rahmen der Studie wurden neben dermatologischen Untersuchungen auch Messungen der Hautfeuchtigkeit und -elastizität vorgenommen sowie fotografische Dokumentationen vor und nach Anwendung der Fußcreme fettend festgehalten. Das Ergebnis: ein 5-Sterne dermatest Siegel für Hautverträglichkeit.



Zertifizierte Naturkosmetik




Sie sind neugierig geworden?

Lesen Sie jetzt die Ergebnisse der Wirksamkeitsstudie und überzeugen Sie sich selbst.



Bewertung der feuchtigkeitsspendenden Wirkung sofort nach dem Auftragen

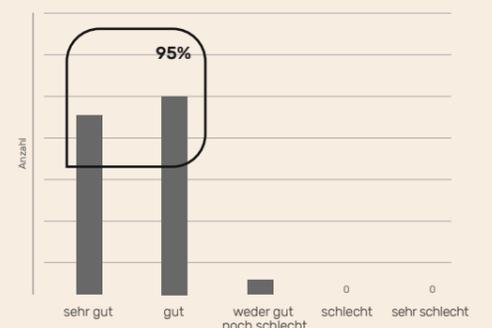

Neue Materialien und Farben

Polster machen Liegen

Ob in der Podologiepraxis, im Fußpflegestudio oder Kosmetikinstitut – bei der Polsteroberfläche einer Behandlungsliege stehen vor allem Komfort, Wohlfühlen und Qualität im Vordergrund. Die neue Polstergeneration der RUCK Behandlungsliegen und Arbeitsstühle vereint ästhetische Eleganz mit funktionalen Eigenschaften.

Farbspiele

Sieben neue Farben in feiner premium Lederprägung, die sich wunderbar mit den CPL Dekoren kombinieren lassen – auch als Ersatzpolster für alle alten Liegenmodelle erhältlich

Innovative Qualität

Hohe Erwartungen werden an das Material für Behandlungsliegen und Stühle gestellt. Sie müssen strapazierfähig, öl-, fett- und desinfektionsmittelbeständig sein: Für unsere Polster verwenden wir eine feine premium Lederprägung – ein hochwertiges Kunstleder, das sich täuschend echt anfühlt. Die Oberfläche ist ebenmäßig und fühlt sich angenehm soft auf der Haut an. Die besondere Haptik und die edlen Farben verleihen dem Polster seinen einzigartigen Charakter. Eine neue, innovative Technologie schützt die RUCK Polster wie nie zuvor. Dank des neuartigen Oberflächenfinishs ist das Material besonders widerstandsfähig und unempfindlich gegen Anschmutzungen. Damit überzeugen die Polster nicht nur optisch, sondern auch dank der neuen Technologie für Langlebigkeit und Nachhaltigkeit in Ihrer Praxiseinrichtung.

Kompromisslose Hygiene

Insbesondere bei Kunstleder für den medizinischen Bereich ist eine regelmäßige Flächendesinfektion Pflicht. Speziell dafür wurde das neue RUCK Polster entwickelt: Es ist besonders schmutzresistent und strapazierfähig – ideal für den Arbeitsalltag, in dem es auf eine schnelle und effiziente Reinigung ankommt. Wir empfehlen die Berührungsfleichen nach jeder Behandlung mit den RUCK Flächendesinfektionstüchern zu desinfizieren und einmal pro Woche mit einem Mikrofaser Tuch und der RUCK Kunstlederreinigung und -pflege zu reinigen sowie Desinfektionsrückstände mit Wasser zu entfernen. Nicht zum Einsatz kommen sollten abrasive oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel. Die neuen Polster sind dank des neuartigen Finishs besonders widerstandsfähig, mit der breiten Palette an Farben haben Sie Qual der Wahl – am Ende ist es eine Frage des persönlichen Geschmacks.



7 natürliche Farbtöne im skandinavischen Stil

ozean

taupe





Made in Germany Echte Handwerkskunst aus Solingen

Seit 25 Jahren arbeiten wir eng mit Solinger Traditionsschmieden und -manufakturen zusammen. Tauchen Sie mit uns ein in den faszinierenden Prozess der Fertigung von RUCK Instrumenten und entdecken Sie, wie aus einem Rohling ein fein gearbeitetes, präzises Instrument entsteht.



Der in Solingen geschmiedete Rohling durchläuft mehrere Aufbereitungsschritte in der Manufaktur, bis er in RUCK Qualität fertiggestellt wird. Rund um das Schmiedeteil müssen bis zu 0,3 mm Material abgetragen werden, um sicherzustellen, dass keine korrosionsunbeständigen Bestandteile auf der Oberfläche verbleiben. Alle Arbeitsschritte sind dabei streng aufeinander abgestimmt und müssen präzise ausgeführt werden, da sie aufeinander aufbauen. Daher gilt: Vorher schon an nachher denken.

Die gefrästen Zangenrohlinge werden in den ersten Schritten geschliffen und mit einer Federlochbohrung, dem Gewindeschneiden sowie dem Senken des Bohrlochs auf die später eingesetzten Federn vorbereitet. Zu diesem Zeitpunkt existiert das Instrument nur in Einzelteilen, doch beim sogenannten Durchstecken werden der Kastenbeck und der Zwischenbeck miteinander "verheiratet".

Mit Hammer und Amboss wird anschließend der Kopf bearbeitet, die Schenkel mit einer Richtgabel gerade geklopft und der Rohling zum ersten Flächenschleifen überführt. Dieser und auch die folgenden Schritte sind maßgeblich geprägt von dem geschulten Auge der jahrelangen Erfahrung und dem Fachwissen der Mitarbeiter.

Was nun folgt ist eine Aneinanderreihung von verschiedenen Schmirgel-, Schleif- und Feilprozessen, um die spezifische Form der Instrumente herauszuarbeiten, Schmiedeoberflächen abzutragen und den blanken Stahl freizulegen. Während dieser Prozesse bekommt das Instrument einen Niet eingesetzt, der als Dreh- und Angelpunkt im Gelenk dient. Was vielleicht simpel in der Theorie klingt, ist in der Praxis eine komplexe Aufgabe verbunden mit viel Erfahrung und Feingefühl. Das gilt für die ganze Produktion der Instrumente. Viele der eingesetzten Maschinen sind Eigenkreationen, um den spezifischen Anforderungen dieser komplexen Prozesse gerecht zu werden.

Instrumente



„Beim Schleifen kann man seine Handschrift eingeben. Man sieht die Entstehung: Aus einem brachialen Schmiederohling wird auf einmal ein sehr feines Instrument.“


Geschäftsführer der Manufaktur in Solingen

Nach dem Aushärten des Instruments im Ofen der Härtereifolgt die Elektropolitur (ePolitur). Dabei werden die Instrumente mithilfe eines eigenentwickelten Gestells einige Minuten in ein Elektrolyten-Bad getaucht und damit in einen Stromkreislauf integriert. Dieser Stromkreislauf ermöglicht den Abtrag von Material an schwer zugänglichen Stellen im Mikrometerbereich und dient dazu, freie Eisenteile zu entfernen, die korrosionsanfällig sind.

Ein großer Vorteil der ePolitur gegenüber der mechanischen Politur liegt in der Erreichbarkeit aller Freiräume

ePolitur für die sehr gute Korrosionsbeständigkeit der RUCK Instrumente sorgt. Mithilfe von Lasertechnik werden diese beschriftet sowie gekennzeichnet. Anschließend werden die Federn an den Instrumenten montiert, deren Vorbohrungen zu Beginn an den Rohlingen vorbereitet wurden. Dank der Federn öffnet sich das Instrument nach dem Schneiden wieder eigenständig, sodass das Arbeiten in durchgängiger Geschwindigkeit gelingen kann.

Die Qualität der Instrumente wird bei jeder Station eingehend geprüft. Trotz allem gibt es eine letzte Endkontrolle.

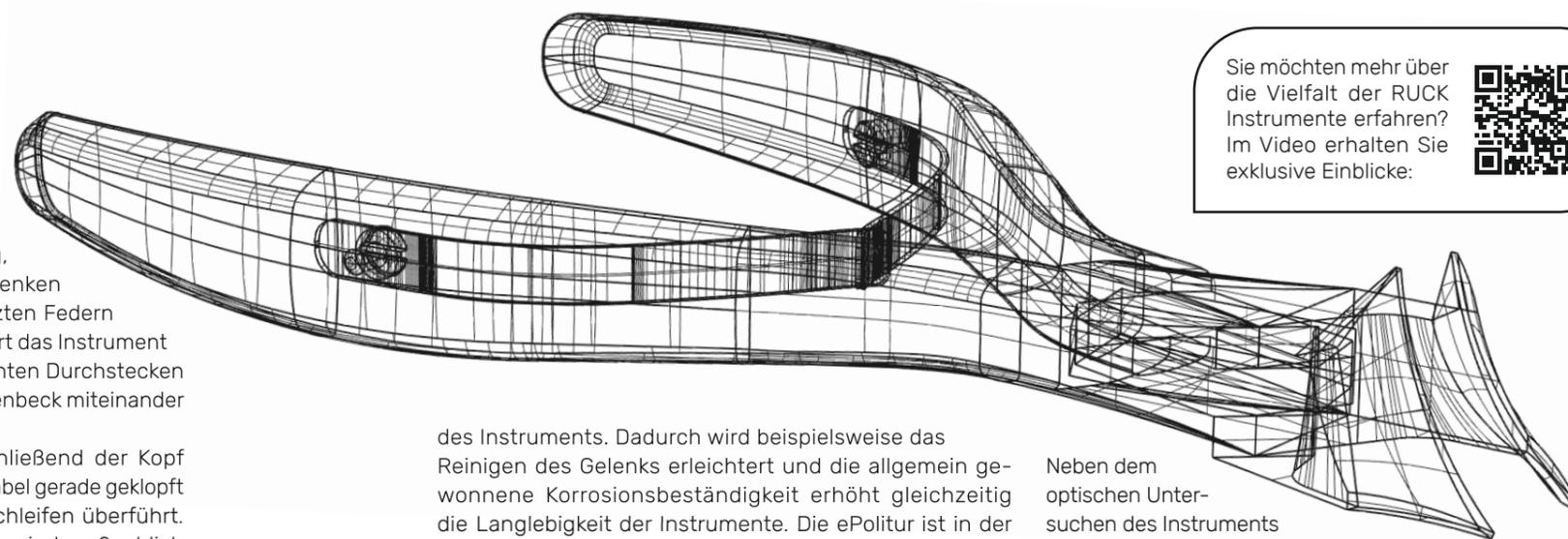

Sie möchten mehr über die Vielfalt der RUCK Instrumente erfahren? Im Video erhalten Sie exklusive Einblicke:



des Instruments. Dadurch wird beispielsweise das Reinigen des Gelenks erleichtert und die allgemein gewonnene Korrosionsbeständigkeit erhöht gleichzeitig die Langlebigkeit der Instrumente. Die ePolitur ist in der Solinger Manufaktur übrigens ein exklusiver RUCK Service!

Nachdem die formgebenden und groben Prozesse abgeschlossen sind, geht es an die Feinheiten. Beim Weißfeilen braucht es Fingerspitzengefühl. Damit ein Instrument schneiden kann, muss es an der Schneidenspitze ansetzen und nach unten hin schließen. Dies lässt sich am besten dadurch überprüfen, indem das Instrument gegen das Licht gehalten wird. Schließt sich beim leichten Zusammendrücken der Lichtspalt in der Schneide, wurde ausreichend gefeilt. Im Anschluss wird das Instrument dann seinem Anwendungsgebiet entsprechend geschärft.

Den nächsten Schritt bilden Passivieren und Lasern. Durch eine chemische Reaktion erhält das Instrument sein letztes Oberflächenfinish, welches in Kombination mit der

Neben dem optischen Untersuchen des Instruments wird eine Schnittkontrolle an einem Papier mit nagelähnlicher Beschichtung durchgeführt. Ist das Produkt einwandfrei, wird es händisch verpackt und ist bereit, verschickt zu werden. Was als ein Stück Rohstahl in den Händen der erfahrenen Solinger Schmiede beginnt, verwandelt sich durch eine Kombination aus traditioneller Handwerkskunst und innovativer Technik in ein Präzisionsinstrument von herausragender Qualität. Jeder Schritt im Fertigungsprozess der RUCK Instrumente, von der ersten Schmiedearbeit bis hin zur letzten Qualitätskontrolle, zeugt von langjähriger Erfahrung.

Die RUCK Instrumente spiegeln mehr als nur ihre funktionale Bestimmung wider. Sie erzählen die Geschichte von handwerklichem Können, von der Liebe zum Detail und von einer Hingabe zur Qualität, die in jeder Fuge, jedem Schliff und jedem Schnitt zu spüren ist.



RUCK Kundenservice Schnell, einfach, übersichtlich

Bei RUCK möchten wir Ihnen zu jeder Zeit die beste Kundenerfahrung über alle Kanäle hinweg bieten, Ihre Anfragen schnell und präzise beantworten und individuell auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche eingehen. Im vergangenen Jahr haben wir daher ein CRM-System eingeführt. CRM steht für Customer Relationship Management, auf Deutsch "Kundenbeziehungsmanagement". Das CRM-System unterstützt uns dabei, die gewohnte RUCK-Betreuungsqualität auch langfristig zu gewährleisten und reibungslose Abläufe auch mit zunehmender Anzahl an Kund:innen zu garantieren. In diesem Zuge wurde das RUCK Rücksende- und Serviceportal eröffnet - das Onlineportal zur schnellen und einfachen Abwicklung von Servicethemen, über das Sie uns zu jeder Zeit erreichen können.

Über unser RUCK Rücksende- und Serviceportal erreicht uns Ihr Anliegen auf bestem und schnellstem Wege.



Service

Rücksendung von Produkten

Ein Produkt hat Ihrer Erwartung nicht entsprochen? Im RUCK Rücksende- und Serviceportal können Sie eine Rücksendung mit wenigen Klicks beantragen. Bitte beachten Sie dabei, dass die Rücksendung innerhalb von 14 Tagen beauftragt wird.

Instrumentenservice

Ihre Zangen laufen schwerfällig, schneiden nicht mehr präzise, haben eine verbogene Spitze oder quietschen bei der Benutzung? Dann ist es Zeit für den Instrumentenservice. Über das RUCK Rücksende- und Serviceportal können Sie unseren Schleifservice nutzen sowie Ihre Instrumente zur Reparatur einschicken.



Einsicht in Bestell- und Wartungshistorie

Im RUCK Rücksende- und Serviceportal können Sie auf einen Blick Informationen zu Ihren Bestellungen und Ihrer Wartungshistorie einsehen, sodass Sie zu jeder Zeit einen Überblick haben, wann die nächste Wartung stattfinden sollte.

Anmeldung von Wartungen und Reparaturen

Wartungen Ihrer Fußpflegegeräte oder Ihrer RUCK Behandlungsliegen können Sie direkt online beantragen. Während Ihr Gerät gewartet wird, stellen wir Ihnen kostenfrei ein Leihgerät für den Service-Zeitraum zur Verfügung. Für Behandlungsliegen, Fußpflegegeräte, Lupenleuchten und andere Geräte sowie Möbel bieten wir zudem auch Reparaturen an.

Ausgezeichneter Kundenservice

Beim BEAUTY FORUM Stars Award 2023 wurden wir in der Unternehmenskategorie „Servicelevel/ Customer Support“ auf Platz 1 gewählt. Dieser Erfolg ist für das gesamte RUCK-Team ein Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung. Auch für die Zukunft stehen unsere Kund:innen stets im Mittelpunkt und wir werden alles dafür tun, Ihnen weiterhin in allen Bereichen den bestmöglichen Service zu bieten.

„UNSER RUCK RÜCKSENDE- UND SERVICEPORTAL IST AN 365 TAGEN IM JAHR RUND UM DIE UHR GEÖFFNET. ES BIETET DIE MÖGLICHKEIT, JEDE KUNDIN UND JEDEN KUNDEN AKTIV UND MIT MAXIMALER TRANSPARENZ IN DIE SERVICEPROZESSE MIT EINZUBEZIEHEN – UND SIE DAMIT NOCH BESSER UND SCHNELLER ZU BETREUEN.“

Achim Erndwein,
Leitung RUCK Kundenservice



Kennen Sie schon den RUCK-Blog?

Hier finden Sie einen bunten Mix aus Fachbeiträgen, aktuellen Informationen, Ankündigungen, Interviews und vieles mehr. Es lohnt sich, regelmäßig vorbeizuschauen, denn es gibt immer etwas Neues zu entdecken!



Telematikinfrastruktur: Datenautobahn in die neue digitale Zukunft



Die faszinierende Welt der Düfte: Kraftspender und Seelenschmeichler



Gut gepolstert: Brennpunkt Nagelfalz

Diese und viele weitere Themen warten im RUCK-Blog auf Sie.



Jetzt QR-Code scannen und alle Blogbeiträge lesen.

HELLMUT RUCK GmbH
Daimlerstraße 23
75305 Neuenbürg
fon +49 (0)7082 944 20
fax +49 (0)7082 944 22 22
feedback@hellmut-ruck.de
hellmut-ruck.de

Bestell-Hotline:
+49 (0)7082 944 22 44

Unsere telefonische Bestellannahme ist von Montag bis Freitag durchgehend von 7.30 bis 18.00 Uhr persönlich für Sie da.

Besuchen Sie unsere RUCK-Erlebnisswelt in Neuenbürg und folgen Sie uns auf



Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

